


miyasuku EyeConMouse
インストール手順

※google Chrome を使用しています。


※バージョンアップの場合は、インストールの前に miyasuku EyeConMouse を終了してください。miyasuku EyeConMouse を終了するとパソコンの電源が切れる場合は、設定画面→その他設定→起動/終了時の動作設定と進み、「終了時にパソコンの電源を切る」のチェックを外してください。

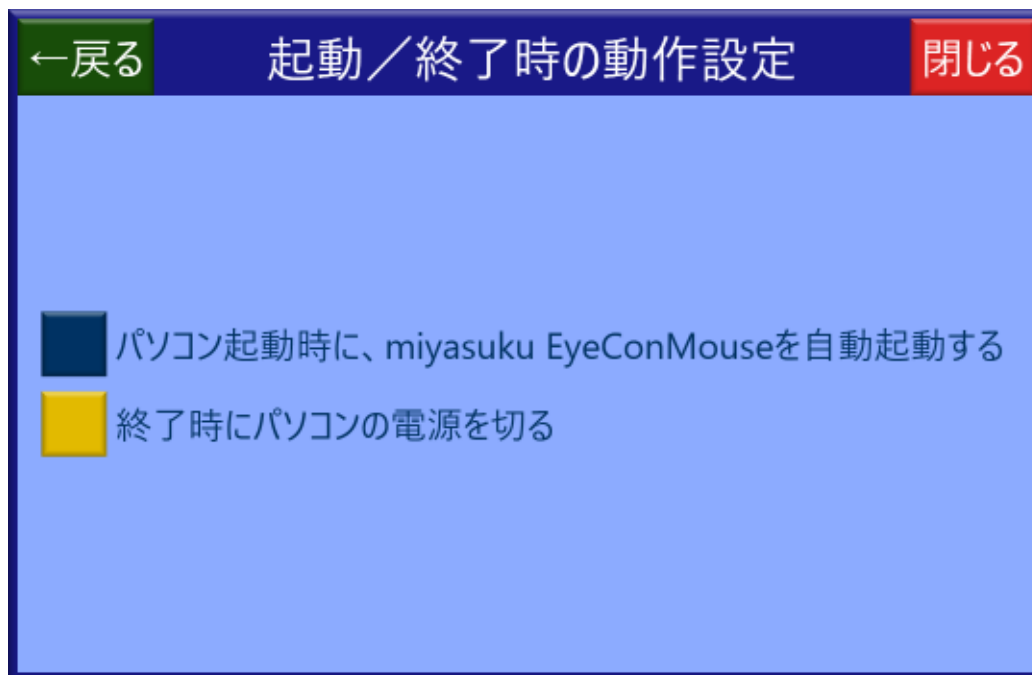

1.miyasuku ホームページの「miyasuku EyeConMouse のご紹介」の「ダウンロード」ボタンを押してください。

【miyasuku EyeConMouse のご紹介】

【製品のダウンロード】

miyasuku EyeConMouseを  **ダウンロード**

インストールの手順は、[こちら](#)をご確認ください。

※miyasuku EyeConMouseは2週間無料でお試し頂けます。

2週間以上お使い頂く場合はライセンスをご購入ください。

※miyasuku EyeConMouseのVersion3.0.0.0より前のmiyasuku EyeConMouseをお使いの方のバージョンアップは有償になります。

バージョンアップ後、2週間無料でお試し頂けます。

バージョンアップ後に元のバージョンに戻すには、最新バージョンをアンインストール後に、元のバージョンを再インストールしてください。

2.ダウンロードが終わるまでしばらくお待ちください。

3.ダウンロードが終わったら、「^」の部分をクリックしてください。




4.表示されたメニューの「フォルダを開く」を選択してください。




5. 「miyasukuEyeConMouse*.*.*.zip」ファイルを選択してください。


※*はバージョンを表す数字になります。

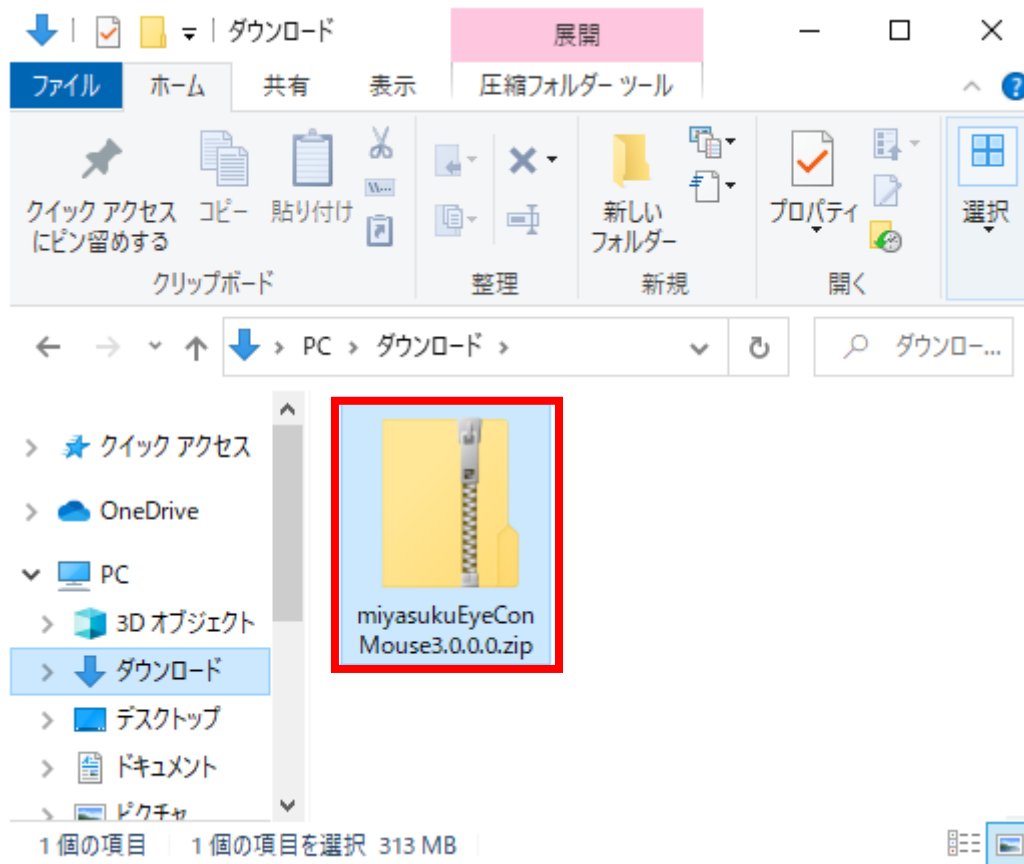

6.画面上部の「圧縮フォルダーツール」をクリックしてください。

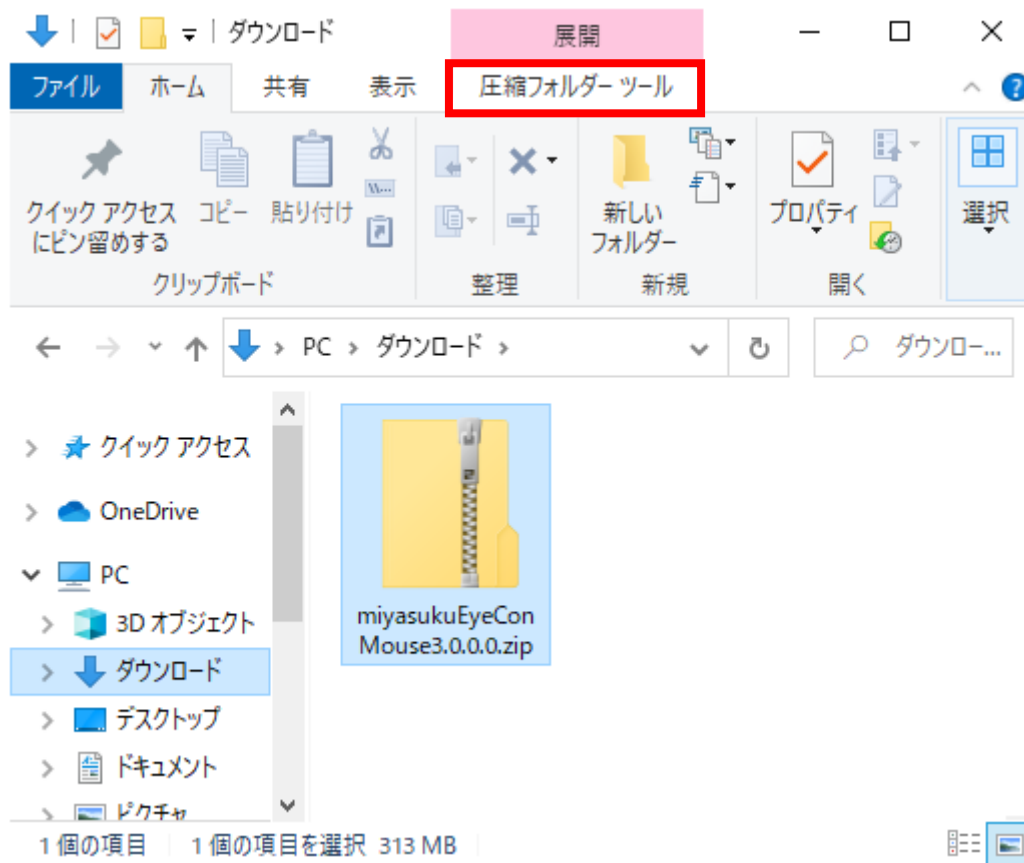

7. 「すべて展開」をクリックしてください。

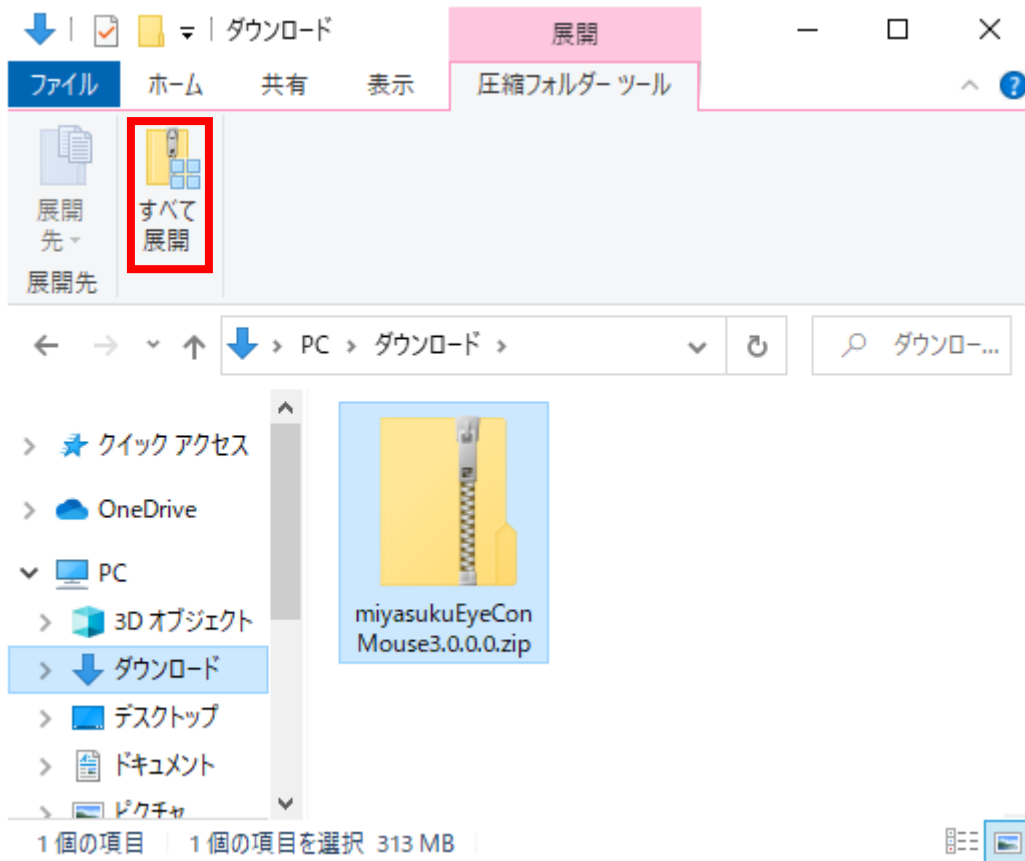

8. 「完了時に展開されたファイルを表示する」をチェックし、「展開」ボタンを押してください。

← 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開

展開先の選択とファイルの展開

ファイルを下のフォルダに展開する(E):

C:\Users\Ogawa\Downloads\miyasukuEyeConMouse3.0.0.0

参照(R)...


完了時に展開されたファイルを表示する(H)

展開(E)


キャンセル

9. 「miyasukuEyeConMouse*.*.*.」フォルダを開いてください。


※*はバージョンを表す数字になります。

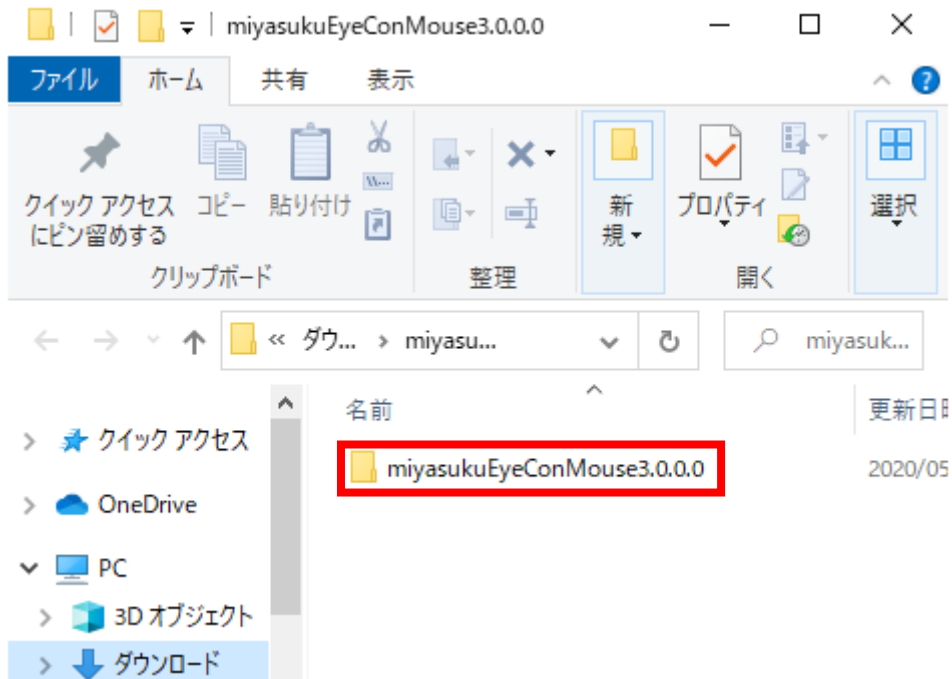


10. 「install」または「install.bat」ファイルを起動してください。

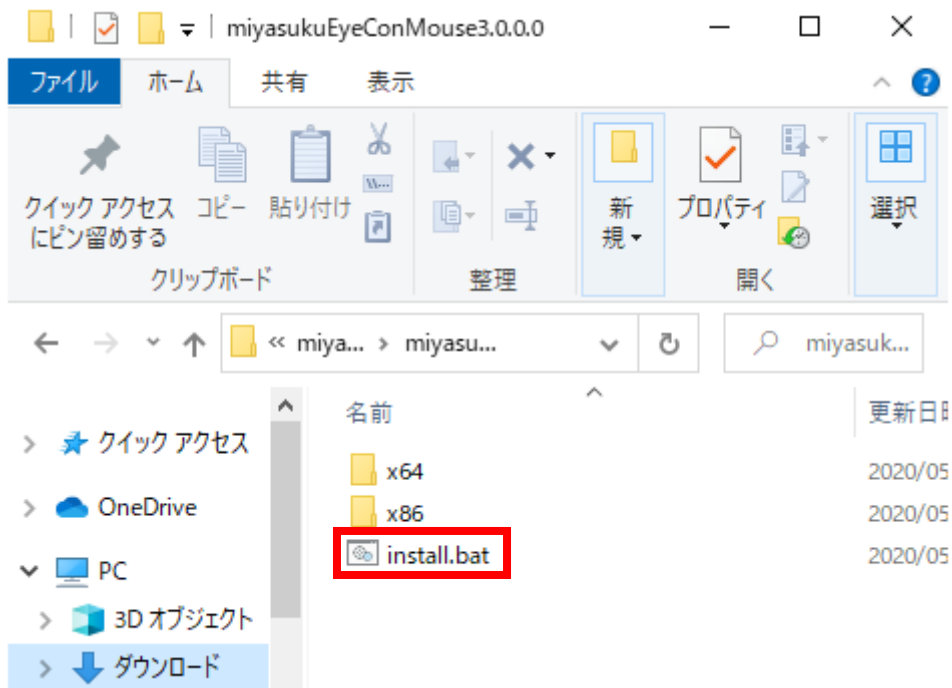


11.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

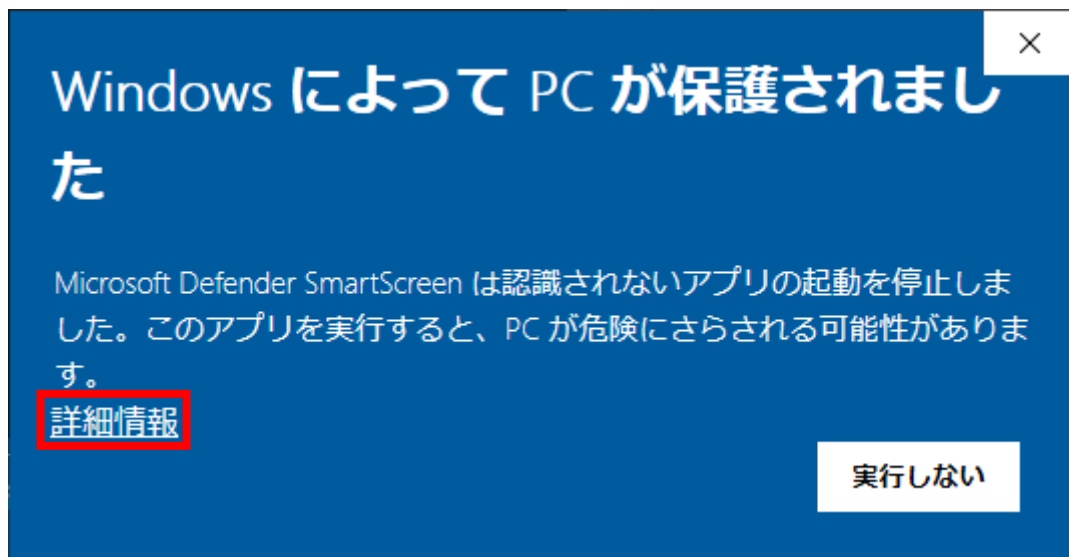

12.「実行」ボタンをクリックしてください。

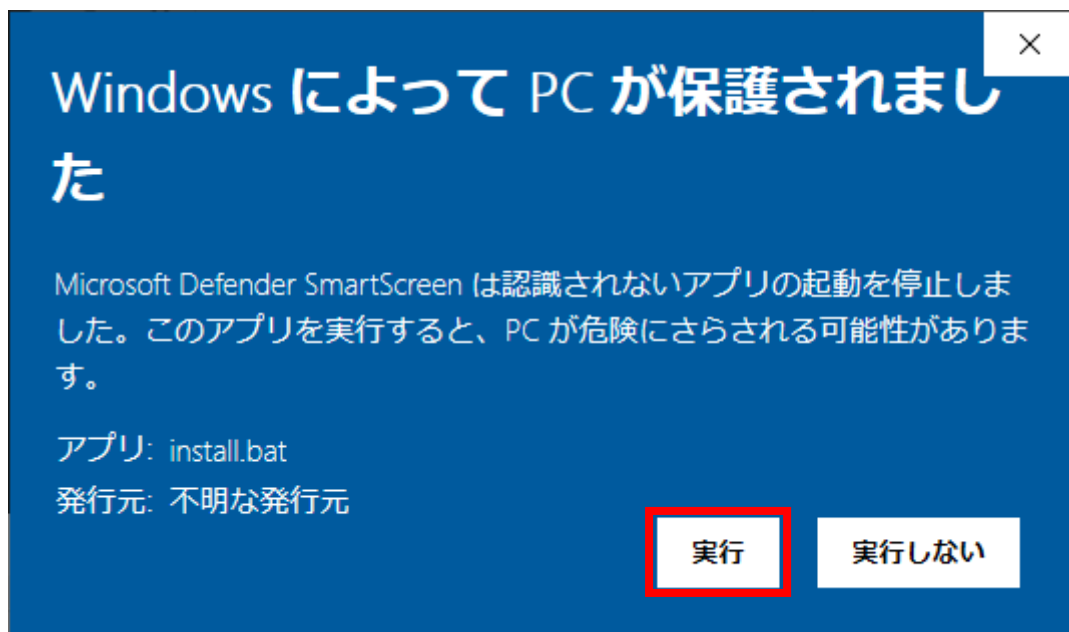


13.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

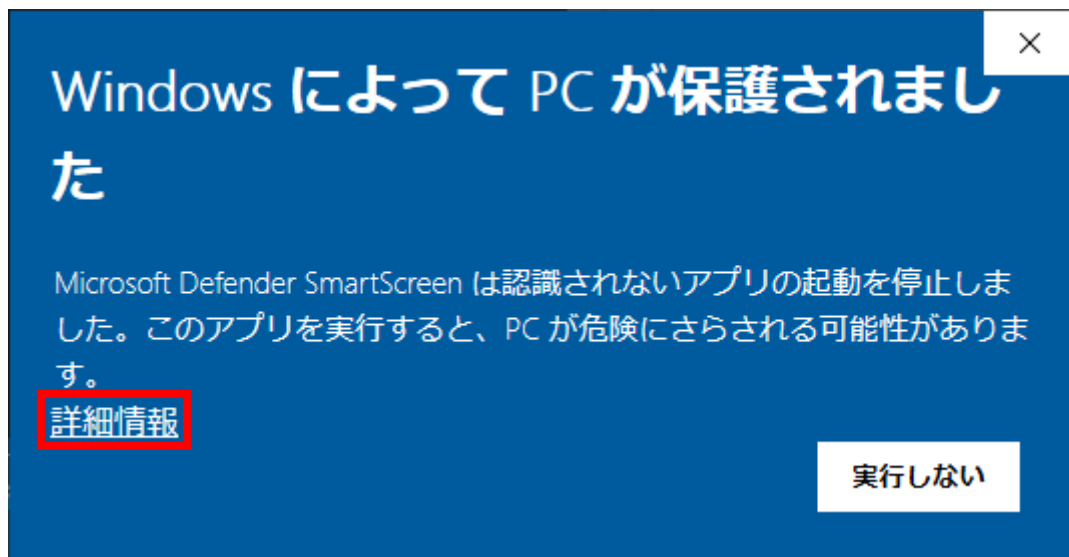


14.「実行」ボタンをクリックしてください。




15. インストーラが起動するので、「次へ」ボタンをクリックしてください。

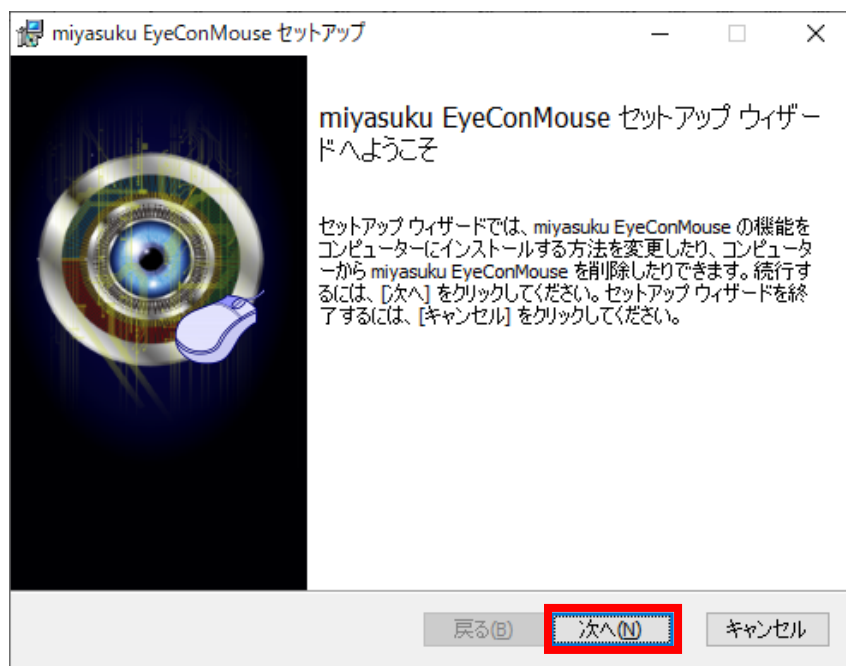


16. 「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

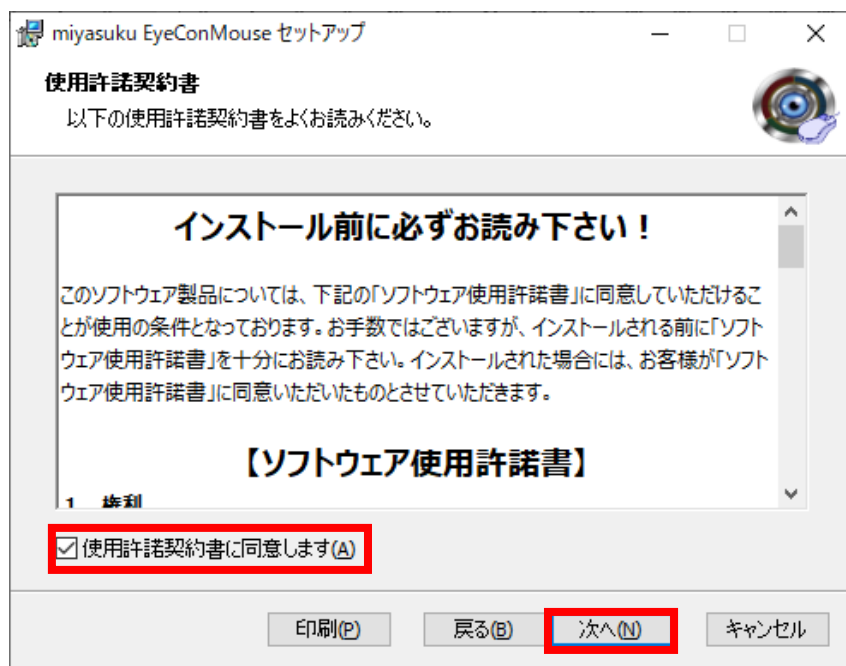

17. 「次へ」 ボタンをクリックしてください。

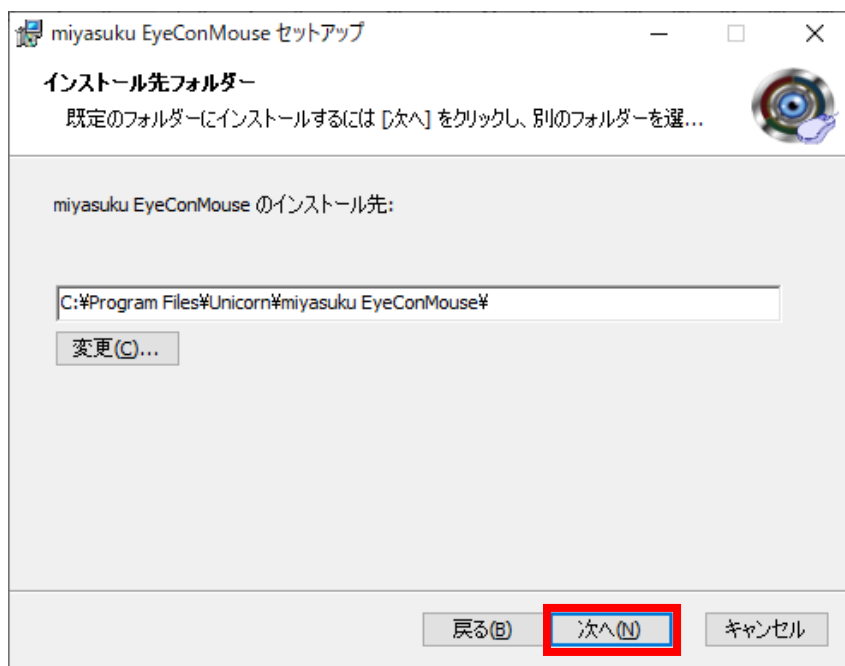


18. 「インストール」 ボタンをクリックしてください。

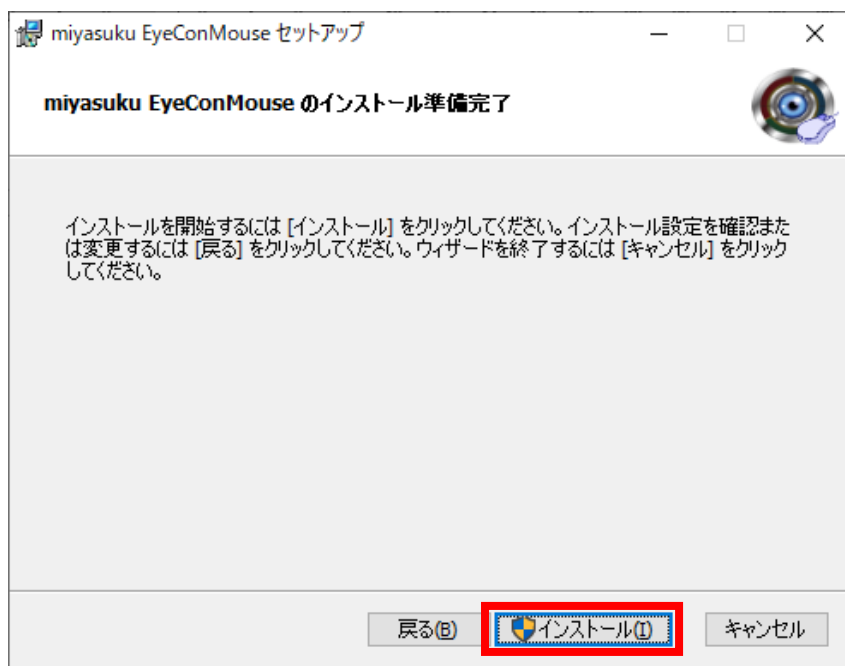


19. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。


※この画面は Windows8 の画面です。

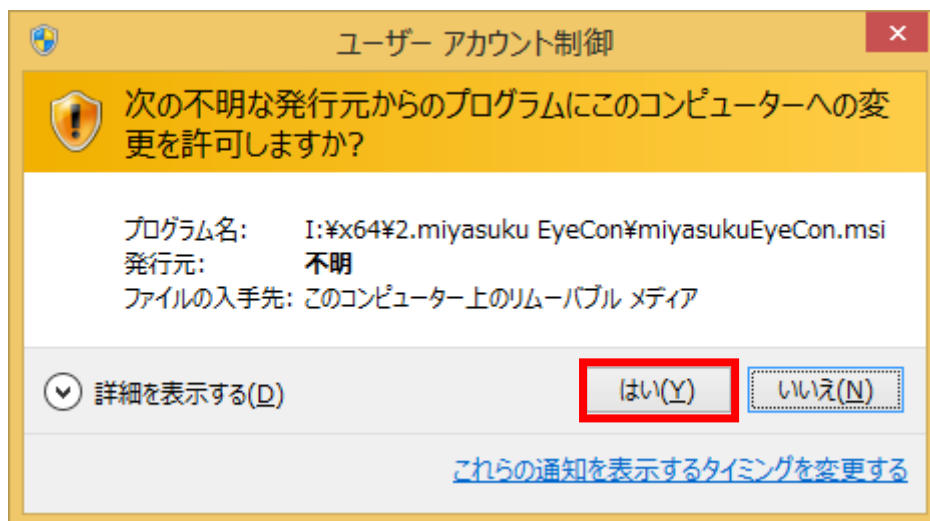

20. インストールが終わるまで、しばらくお待ちください。

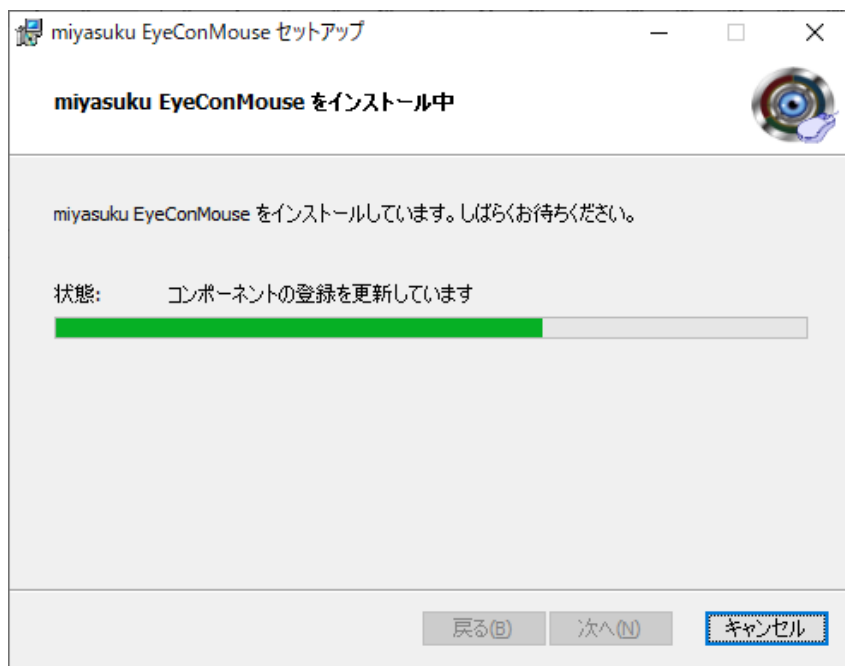

21. 14日間無料使用のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。

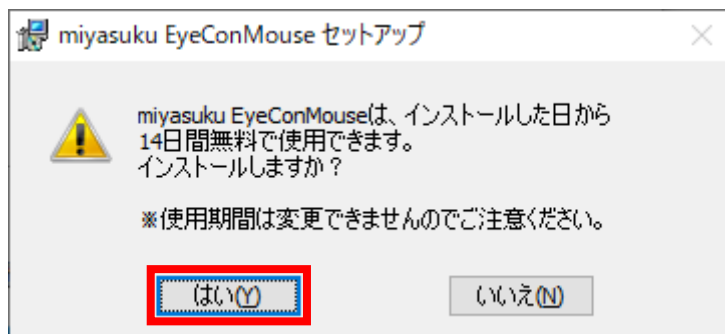

22.インストールが終わったら、「完了」ボタンをクリックしてください。

