

miyasuku EyeConLT2
ライセンス購入・登録手順
【USB ライセンス】


【USB ライセンスについて】

miyasuku EyeConLT2 の USB ライセンスは、弊社から郵送する USB メモリをパソコンに取り付けてライセンス登録します。

USB メモリをパソコンに取り付けてアンインストールすることで、別の PC で再度ライセンス登録ができます。

※正しくアンインストールしなかった場合の USB 復旧は、作業料 2,000 円(送料・税別)を頂いておりますのでご了承ください。

【USB ライセンスの購入・登録手順】

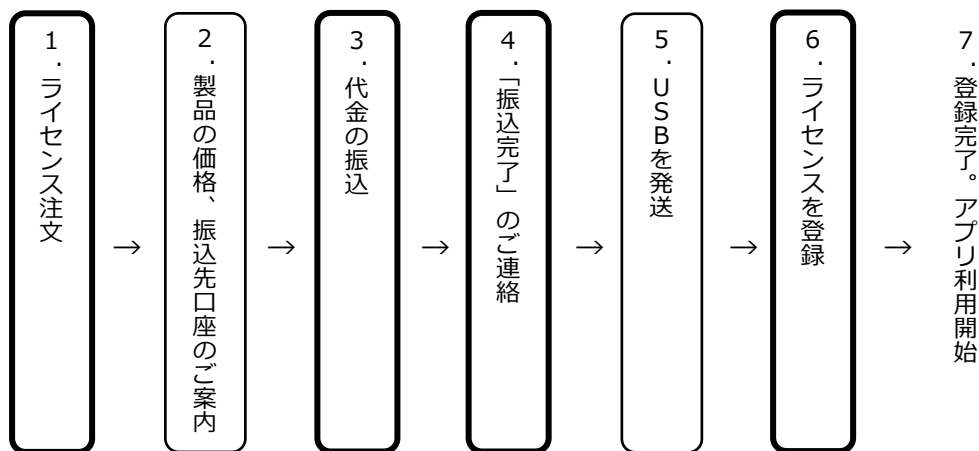

※太枠は、購入者がおこないます。

1. ライセンス注文

Web サイトの「[お問い合わせフォーム](#)」ボタンをクリックします。

「お問い合わせフォーム」に必要事項を記入します。

- 製品名 : miyasuku EyeConLT2
- ライセンスの種別 : USB ライセンス
- 数量 : 必要数をご記入ください。

お問い合わせフォーム

| | |
|--|---|
| 区分 (個人/法人) * | 問い合わせ日 |
| <input checked="" type="radio"/> 個人 <input type="radio"/> 法人 | <input type="text" value="2023-12-21"/> |
| 氏名 (漢字) | 氏名 (フリガナ) <input checked="" type="radio"/> 本人 <input type="radio"/> ご家族 <input type="radio"/> 支援者 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 企業・団体名 ※団体等に所属されている方は、ご記入ください。 | 職種 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 都道府県 | 住所 |
| <input type="text" value="選択してください"/> | <input type="text"/> |

記入事項を確認し、送信ボタンを押します。

- ※ お支払いは、基本的に前払いとさせていただきます。
- ※ 領収書・納品書・請求書によるあと払いが必要な場合は、その旨もあわせてお知らせください。

2. 製品の価格、振込先口座のご案内

「お問い合わせフォーム」に入力いただいたメールアドレスへ、miyasuku サポートセンターより「製品の価格」、「弊社振込先口座」の案内メールが届きます。

3. 代金の振り込み

案内メールをご確認いただき、指定口座へ代金を振り込みます。

4. 「振込完了」のご連絡

振り込み完了後、その旨を miyasuku サポートセンターへメールで連絡します。その際、以下につきましてもあわせてお知らせください。

- 振込依頼人名
- 商品お届け先の氏名、郵便番号、住所、電話番号

5. USB を発送


miyasuku サポートセンターにて入金を確認しましたら、インストールおよびライセンス登録用 USB を発送します。

発送後、miyasuku サポートセンターより「発送完了」メールが届きます。

6. ライセンスを登録


届いた USB メモリをお使いになるパソコンに接続します。

- ① USB メモリの中に保存されているファイル「キーコード.txt」をクリックします。

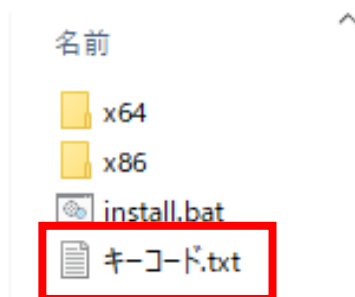


- ② ファイルを開いて、表示された「キーコード」をコピーします。


- ③ miyasuku EyeConLT2 を起動します。
- ④ パソコンの画面右下の操作パネルを押します。

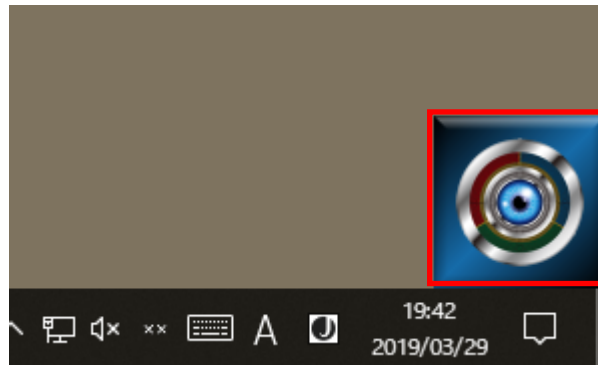

- ⑤ [設定]ボタンを押します。

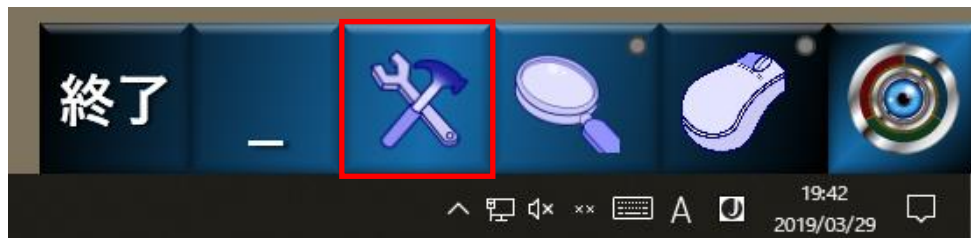


- ⑥ 設定画面の[バージョン情報]ボタンを押します。続いて[ライセンス登録]ボタンを押します。

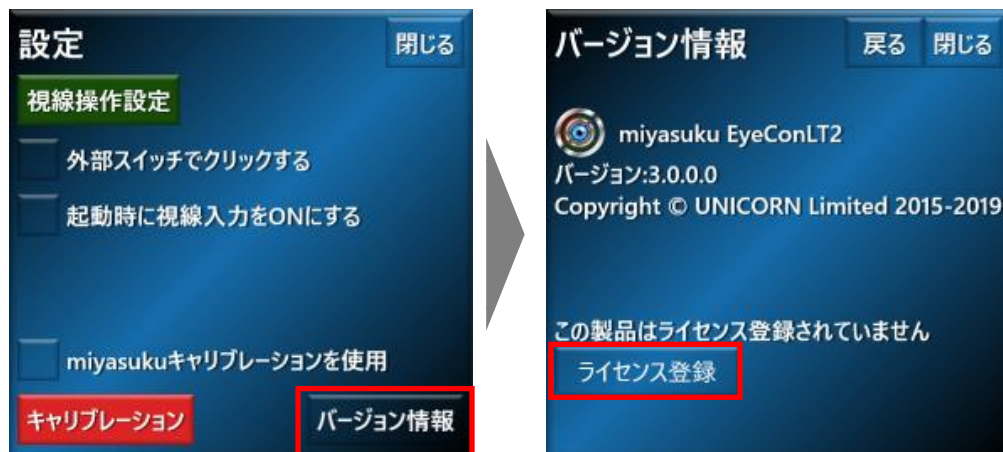


- ⑦ 表示された[ライセンス情報]画面で、[ライセンス登録]ボタンを押します。




- ⑧ [ライセンス種別]で[USB]を選択します。
②でコピーした「キーコード」を貼り付けまたは入力して[登録]ボタンを押します。

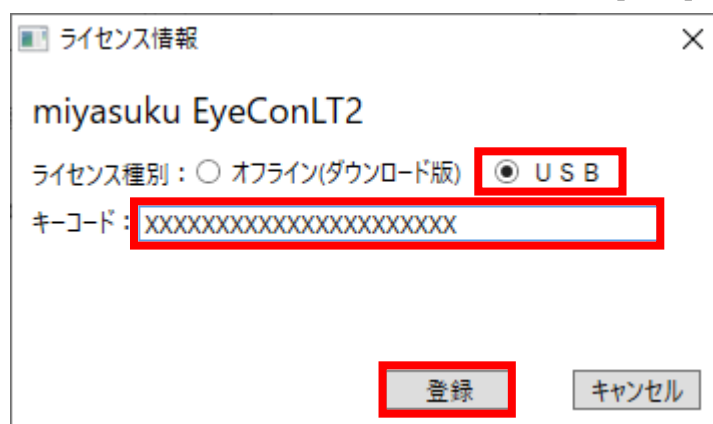

- ⑨ 「ライセンスを登録しました」と表示されたら[OK]ボタンを押します。

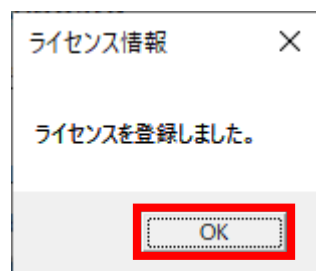

- ⑩ [ライセンス情報]画面の[×]ボタンを押し、画面を閉じてください。

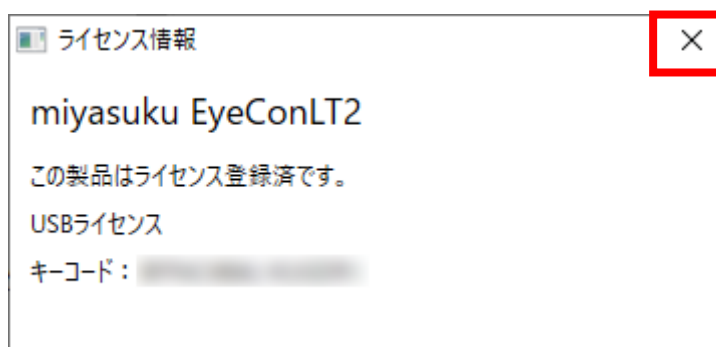

以上で、登録完了です。 miyasuku EyeConLT2 をお使いいただけます。